

I.V. House 949S TLC® Foot Splint with Straps (발 부목S)

IV Therapy Foot Splint / Directions

일회용 제품입니다. 발의 측면 또는 내측 중 하나에 적합합니다.

TLC 발 부목은 IV를 삽입하고 IV 튜브에 연결하기 전 또는 후에 발 또는 발목에 적용할 수 있습니다.

1.

부목의 오목한 쪽이 위로 향하게 하고 끈을 풀니다.

2.

유아의 발목을 부목의 개구부에 맞춥니다.
발뒤꿈치는 부목의 바깥쪽 가장자리에 있
돌출된 곡선과 대략 일치해야 합니다.

부목을 회전시켜 좌우 측면 또는 안쪽으로,
왼쪽 또는 오른쪽 발에 위치시킵니다.

3.

부목의 어느 쪽 끝이 발가락에 맞는지,
어느 쪽 끝이 아래 다리에 맞는지 결정합니다.

4.

2개의 끈 고정 슬롯은 2개의
위치에 있다는 점에 유의하십시오.

5.

유아의 발에 맞도록 부목을 향하게 한 상태에서
끈을 각 슬롯의 상단 위치로 밀어 넣습니다.

6.

IV 튜브 아래로 끈을 내리고
상단 끈을 다리와 부목을
감싸게 합니다.
끈이 부목 뒤쪽을 감싸면서
가볍고 팽팽하게 합니다.

7.

끈 사이를 사용하여 하단 다리에
튜브를 고정합니다. 발가락 부분의
튜브 루프 아래에 끈을 밀어 넣습니다.
발가락에 하단 끈을 감싸고 발가락
근처의 부목 구멍을 통해 끈을 밀어 넣습니다.

8.

참고 : 끈 안쪽으로 손가락을
밀어서 끈이 너무 조여 정맥
주사액의 순환이나 주입을
방해하지 않도록 하십시오.
사전 부착된 벨크로 후크 탭을
사용하여 끈의 끝을 고정하십시오.

Tips and Tricks for Use of 949S TLC® Foot Splint

각 슬롯에는 2개의 위치가 있다는 점에 유의하십시오.

부목이 발에 맞도록 방향을 잡습니다.
끈이 상단 슬롯에 위치하지 않은 경우 각
슬롯에서 끈을 상단 위치로 이동하십시오.

상단 끈이 다리와 부목의
양쪽 가장자리를 감싸고 있습니다.

발가락 끈을 적용할 때는 발가락 근처의
부목 구멍을 통해 끈을 삽입해야 합니다.
발가락에 있는 부목의 바깥쪽 가장자리를
끈으로 감싸지 마십시오.

발가락 부분에 최종적으로
끈을 적용합니다.



949S TLC® FOOT Splint
4~12개월 또는 체중 6~12kg의
유아에게 적합합니다.

Touch / Look / Compare



I.V. HOUSE®
Protection Over and Above®

· 공식 수입·판매원 : **AMC** 주식회사 에이블엠앤씨 · CONTACT US 1577-5264

I.V. House 949XS TLC® Foot Splint with Straps (발 부목XS) IV Therapy Foot Splint / Directions

일회용 제품입니다.

발의 측면 또는 내측 중 하나에 적합합니다.

TLC 발 부목은 IV를 삽입하고 IV 튜브에 연결하기 전 또는 후에 발 또는 발목에 적용할 수 있습니다.

1.

부목의 오목한 쪽이 위로 향하게 하고 끈을 풀니다.

2.

유아의 발목을 부목의 개구부에 맞춥니다. 발뒤꿈치는 부목의 바깥쪽 가장자리에 있는 돌출된 곡선과 대략 일치해야 합니다.

부목을 회전시켜 좌우 측면 또는 안쪽으로, 왼쪽 또는 오른쪽 발에 위치시킵니다.

3.

IV 튜브 아래로 끈을 내리고 상단 끈을 다리와 부목을 감싸게 합니다. 발가락에 하단 끈을 감싸고 발가락 근처의 부목 구멍을 통해 끈을 밀어 넣습니다.

발가락 부분의 튜브 루프 아래에 끈을 밀어 넣습니다.

끈 사이를 사용하여 하단 다리에 튜브를 고정합니다.

끈이 부목 뒤쪽을 감싸면서 가볍고 팽팽하게 합니다.

4.

참고 : 끈 안쪽으로 손가락을 밀어서 끈이 너무 조여 정맥 주사액의 순환이나 주입을 방해하지 않도록 하십시오. 사전 부착된 벨크로 후크 탭을 사용하여 끈의 끝을 고정하십시오.


Tips and Tricks for Use of 949XS TLC® Foot Splint

상단 끈이 다리와 부목의 양쪽 가장자리를 감싸고 있습니다.

발가락 끈을 적용할 때는 발가락 근처의 부목 구멍을 통해 끈을 삽입해야 합니다.
발가락에 있는 부목의 바깥쪽 가장자리를 끈으로 감싸지 마십시오.



발가락 부분에 최종적으로 끈을 적용합니다.

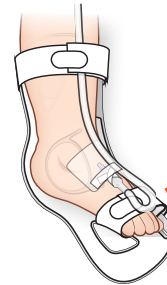

949XS TLC® Foot Splint
생후 0~4개월 또는 2.5~7kg의
대부분의 신생아에게 적합합니다.

Touch / Look / Compare



I.V. HOUSE®
Protection Over and Above®

· 공식 수입·판매원 : 주식회사 에이블앤씨 · CONTACT US 1577-5264